


## ・同封されているパーツ

右図は  
左用です



※同封されているパーツ（左用の場合）

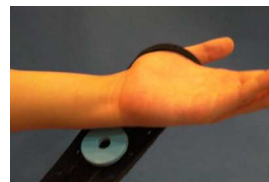

③ パッドを尺骨茎状突起に合わせ、そのまま手関節を一周させたのち、ベルクロにて固定してください。



④ より強固な固定が必要な場合は、付属のバンドをパッド上部から押さえるようにとめます。



⑤ 装具装着時、掌側



⑥ 母指外転方向への圧迫が強い場合は、図のように付属のマジックテープで止めてください。

## ・装着方法について



装具装着時には手関節、中間位（親指を上に向けた位置）にて行ってください。

① 本体穴を母指に通し、背側へまわします。



② 尺骨茎状突起頂点にパッド穴を合わせ、位置の決定を行ったのち、本体裏のベルクロに貼り付けます。

\* ご使用に際し、ご不明な点がございましたら  
当社までご連絡ください

商品に関するお問い合わせ

商品開発部門 株式会社 エヌ・オー・ティー

東京都品川区北品川 1-28-2

Tel 03-5479-7002

Fax 03-5479-3800

お振込・発送などに関するお問い合わせ

商品販売・発送部門 株式会社 コナウインズ

東京都港区三田 2-7-7-501

Tel 03-6435-0371

Fax 03-6436-3272

# DRUJ サポーター

## -取扱説明書-

NAKAJIMA ORTHOPÄDIE TECHNIK  
**NOT**